



Verificare la presenza di sintomi di arresto cardiaco improvviso:

non risponde non respira regolarmente


1 TIRARE

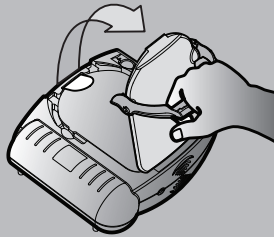

2 APPLICARE

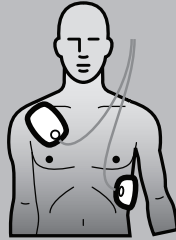

3 PREMERE

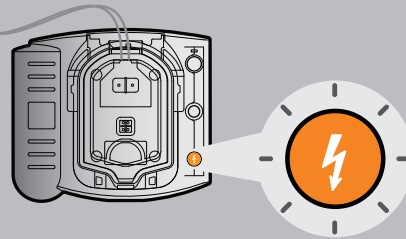


SCHEDA DI RAPIDA CONSULTAZIONE

ISTRUZIONI DETTAGLIATE



Per iniziare: Tirare l'impugnatura.
Togliere la copertura protettiva.



Rimuovere gli indumenti dal torace del paziente.
Pulire e asciugare l'epidermide, se necessario.


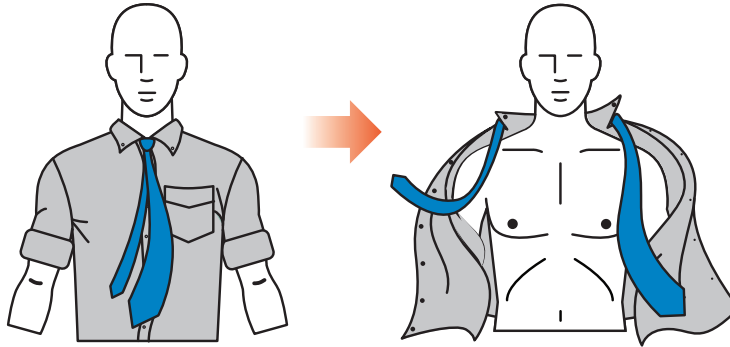


Staccare la pellicola di protezione e rimuovere gli elettrodi.

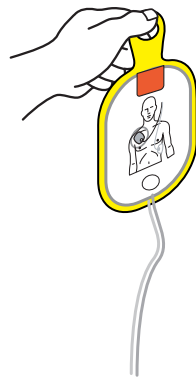
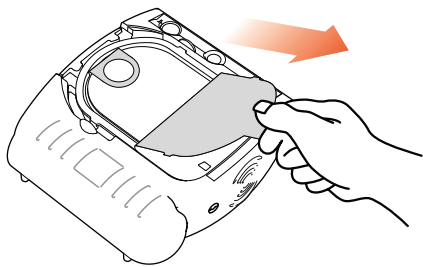


3

Staccare gli elettrodi adesivi
dal rivestimento in plastica gialla.

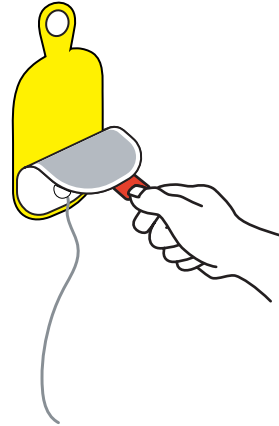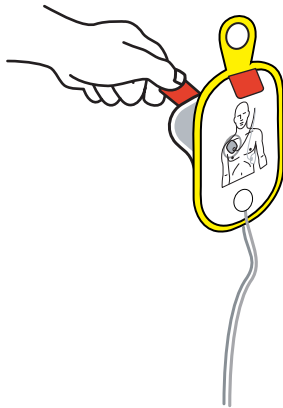

Posizionare gli elettrodi esattamente
come mostrato nella figura.

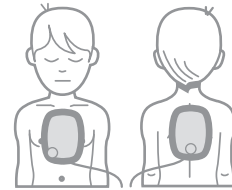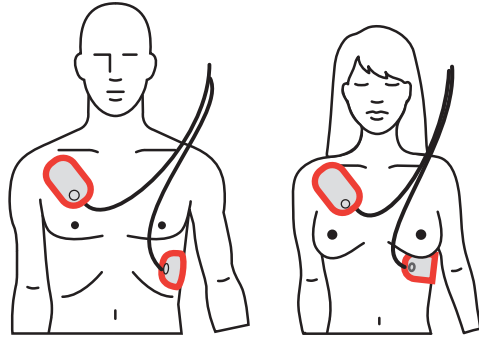


(0-8 ANNI) < 25 kg

Analisi en corso ... Non toccare il paziente!


Attendere fino a che  smette di lampeggiare



Per erogare la scarica: Premere il pulsante lampeggiante
ARANCIONE. Non toccare il paziente.

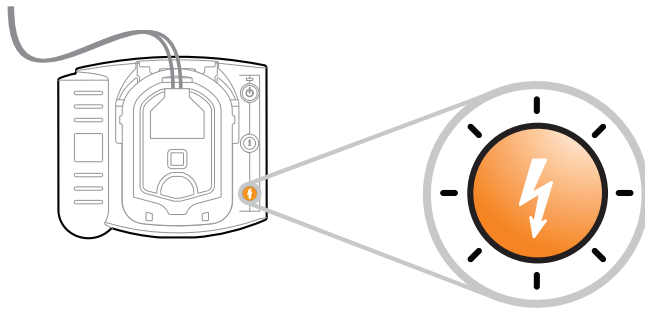


Per il soccorso con RCP:
Premere il pulsante lampeggiante **BLU**.

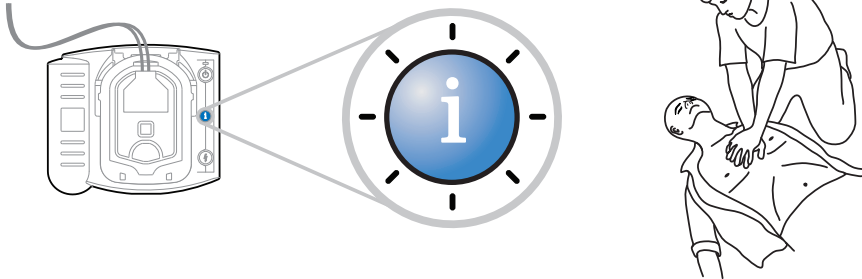


30 compressioni • stringere il naso, inclinare la testa • soffiare a fondo 2 volte

Per accendere il dispositivo:
premere il pulsante **VERDE** di accensione/spengimento.

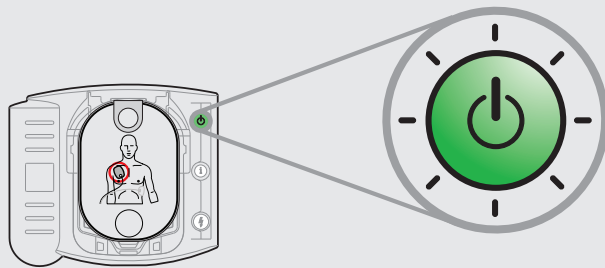

Se la cartuccia deve essere sostituita:
Far scorrere il dispositivo di aggancio.

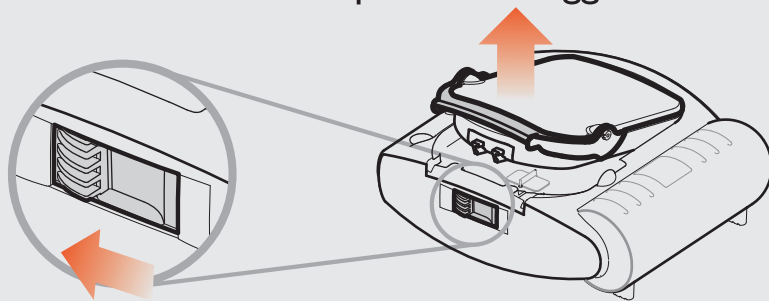

Stampato negli U.S.A.

Philips Medical Systems
Seattle, WA 98121

Copyright © 2008
Philips Electronics North American Corp

011838 REV VII

M 5 0 6 6 - 9 7 8 0 5



0 1 1 8 3 8 - 0 0 0 6

PHILIPS